

VILIM ball

VILIM ball

**Banebrytende enhet for
tremorreduksjon**




Hva er VILIM ball?

VILIM ball er en toppmoderne ikke-invasiv håndholdt medisinsk terapeutisk enhet som gir nevromodulasjonsterapi og er i stand til å redusere håndtremor midlertidig.

Det er den første og eneste CE0197 sertifiserte medisinske klasse 2a terapeutiske enheten til håndtremor reduksjon i EU. Den ble designet for å lette Essensiell tremorsymptomer og gi pasienter mulighet til å lettere utføre daglige aktiviteter.

Hvordan BRUKE DEN?

Den foreslåtte behandlingstiden er 10 minutter per hånd, tre ganger daglig, med intervaller på 4 timer. For å evaluere effekten for hver pasient bør enheten brukes i minst 14 dager.

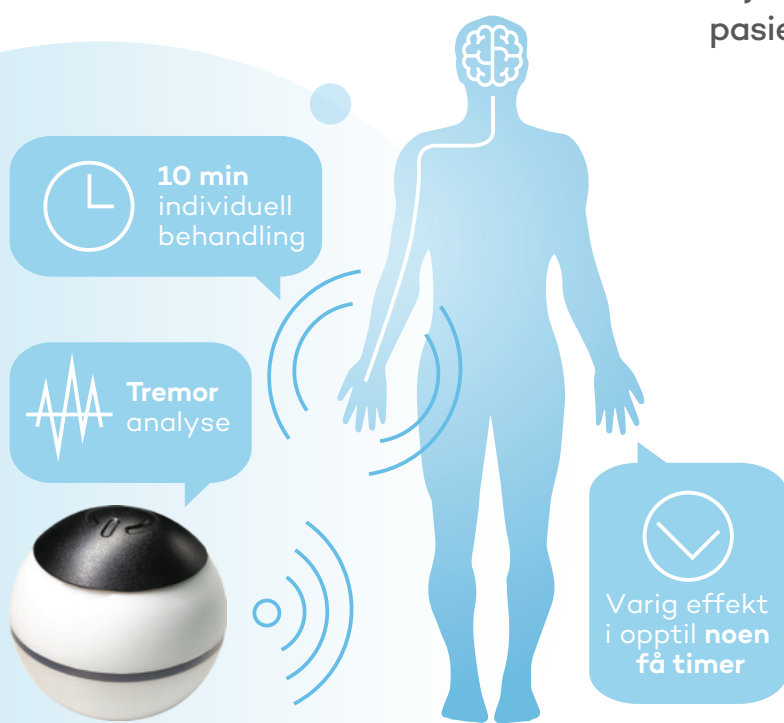

Enklere å utføre
vanlige oppgaver

TILPASS DEN TIL DEG

VILIM ball er den første og eneste CE merkede medisinske enheten til håndtremorreduksjon.

Enheden implementerer kunstig intelligens-algoritmer som analyserer skjelvinger og tilpasser seg hver enkelt pasient individuelt.

Hvordan VIRKER DEN?

Enhetsens virkemåte er basert på hjernestimulering gjennom mekaniske vibrasjoner.

Den kunstige intelligens-algoritmen analyserer håndtremor og tilpasser behandlingen til hver pasient individuelt.



Scan
QR-koden for mer
informasjon.

HVORFOR VILIM ball?



SERTIFISERT: Sertifikatet betyr at den terapeutiske enheten er trygg og effektiv for pasienter med Essensiell tremor og oppfyller alle gjeldene EU-standarder som en medisinsk innretning.



PERSONIFISERT: Den kunstige intelligens-algoritmen analyserer håndtremor og tilpasser behandlingen individuelt til hver enkelt pasient.



RASKE RESULTATER:

Effekten føles umiddelbart etter behandling.



LETT Å BRUKE: Behandlingen starter når du har trykket på knappen. Og stopper automatisk når full behandlingstid er oppnådd.



VARIG EFFEKT:

Effekten kan føles opp til 4 timer (gjennomsnittlig varighet ~1,5 timer).



IKKE-INVASIV: Denne typen enhet foretrekkes generelt når det er mulig på grunn av lavere risiko og større bekvemmelighet for pasientene.



LETT OG DISKRE:

Ideel til bruk offentlig.



RIMELIG:

Den eneste medisinske enheten i denne prisklassen.



PASSER BEGGE HENDER: VILIM ball kan brukes til begge hender hvis det ikke er noen betydelig forskjell på håndtremor mellom venstre og høyre hånd.



OPPLADBAR:

Enheden er oppladbar med en «easy to connect» magnetisk lader.

Mobil app til HÅNDTREMORMÅLING

For å overvåke effektiviteten av behandlingen med VILIM ball, kan du laste ned vår mobil app – STEADY HANDS. Det er et tremormeter som kan måle stabiliteten i hånden din ved hjelp av objektive vitenskapelige metoder og moderne kunstig intelligens-algoritmer.

Appen:

- an bidra til å identifisere årsaken til håndtremor;
- overvåker din tremors utvikling underveis i behandlingen;
- identifiserer områder for forbedring.

• It is currently free and you can download it from: •



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play



ANMELDELSER



“VILIM ball er kjempebra! Jeg bruker det i min klinikk «Better Brain&Body» og jeg har en hjemme til mannen min som har Essensiell tremor.”

– *Funksjonell nevrolog Dr. Alicia M. Brown, North Carolina*



“Jeg er overrasket over hvordan VILIM ball fikk meg til å føle meg! Jeg har hatt ET hele livet, og nå har jeg ingen eller veldig lite hodetremor, indre skjelvinger, ingen stemme, tremor i hele kroppen, og hendene mine har bare veldig svak skjelving. Jeg føler meg så godt som kurert.”

– *Nichole Wilton (Shakey Nan), Australia*



“Vibrasjonsbehandling ved tremor har en veldig lang tradisjon. Frem til nå var enhetene brukt i denne behandlingen for store og klumpete. Med VILIM ball har vi nå fått en praktisk enhet som kan brukes hvor som helst til moderne, personlig behandling.”

– *Nevrolog Dr. Dieter Volc, Østerrike*



“VILIM ball lar meg redusere tremor effektivt, raskt og diskret hvor som helst og når som helst. Den er liten, praktisk, elegant, jobber stille og aller viktigst: Helt fri for kjemikalier og uten bivirkninger! Jeg liker spesielt hvor lett den er å bruke. Jeg kan alltid ha den med meg i veska.”

– *Britta Sprick, Tyskland*

REFERANSER

- 1 ABRAMAVICIUS, S., ET AL. LOCAL VIBRATIONAL THERAPY FOR ESSENTIAL TREMOR REDUCTION: A CLINICAL STUDY // MEDICINA. BASEL : MDPI AG. VOL. 56, ISS. 10, ART. NO. 552, P. 1-9, 2020.
- 2 LENDRAITIENE ET AL., RESEARCH OF UPPER LIMB TREMOR REDUCTION WITH A VIBRATIONAL MEDICAL DEVICE FOR PARKINSON'S DISEASE, TECHNOLOGY AND DISABILITY, 2024.
- 3 SAGGINI, R., ET AL. VIBRATION IN NEUROREHABILITATION: A NARRATIVE REVIEW. MEDICAL RESEARCH ARCHIVES, 5(11), 2017.
- 4 HAAS, C., ET AL. 'THE EFFECTS OF RANDOM WHOLE-BODY-VIBRATION ON MOTOR SYMPTOMS IN PARKINSON'S DISEASE'. NEUROREHABILITATION, VOL. 21, NO. 1, PP. 29-36, 2006.
- 5 WWW.VILIMED.COM/HAND-TREMOR-REDUCTION

KONTAKTINFORMASJON

Forhandler i Norge:

Øvrebø Rehabilitering AS

Tlf: 32 24 42 50

Mail: firmapost@ovrebo.no

Web: www.ovrebo.no

Adresse: Rosenkrantzgata 11, 3018 Drammen

Produsent:

UAB “VILIMED”

Phone: +370 646 22334

E-mail: info@vilimed.com

Website: www.vilimed.com

Address: K. Barsausko str. 59, Kaunas, Lithuania